





ライカバーチャルスライド
クラウドデータ操作マニュアル

1. インターネットブラウザから <https://leicaepathology.slidehosting.com/> にアクセスし、事前に配布されたユーザーID とパスワードを入力した上で「User Login」をクリックします。

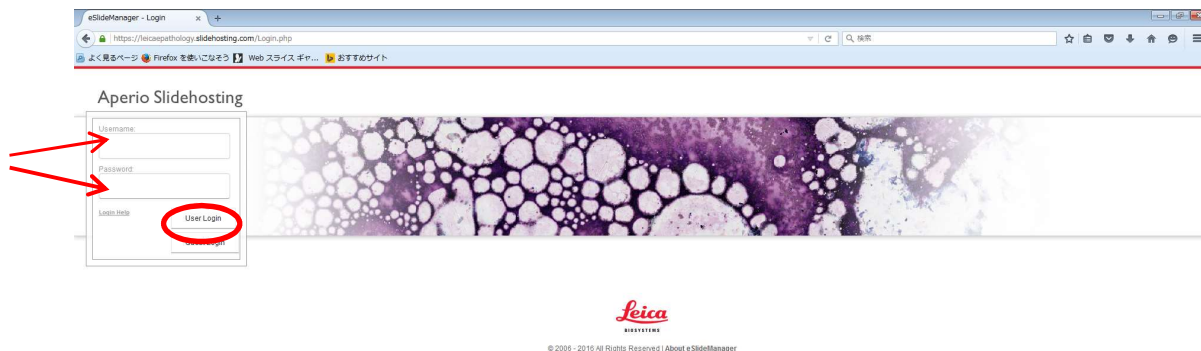

2. 下記の情報が表示されます。目の形になっているところをクリックし、バーチャル画像を開きます。ほかのところをクリックしないよう注意してください。

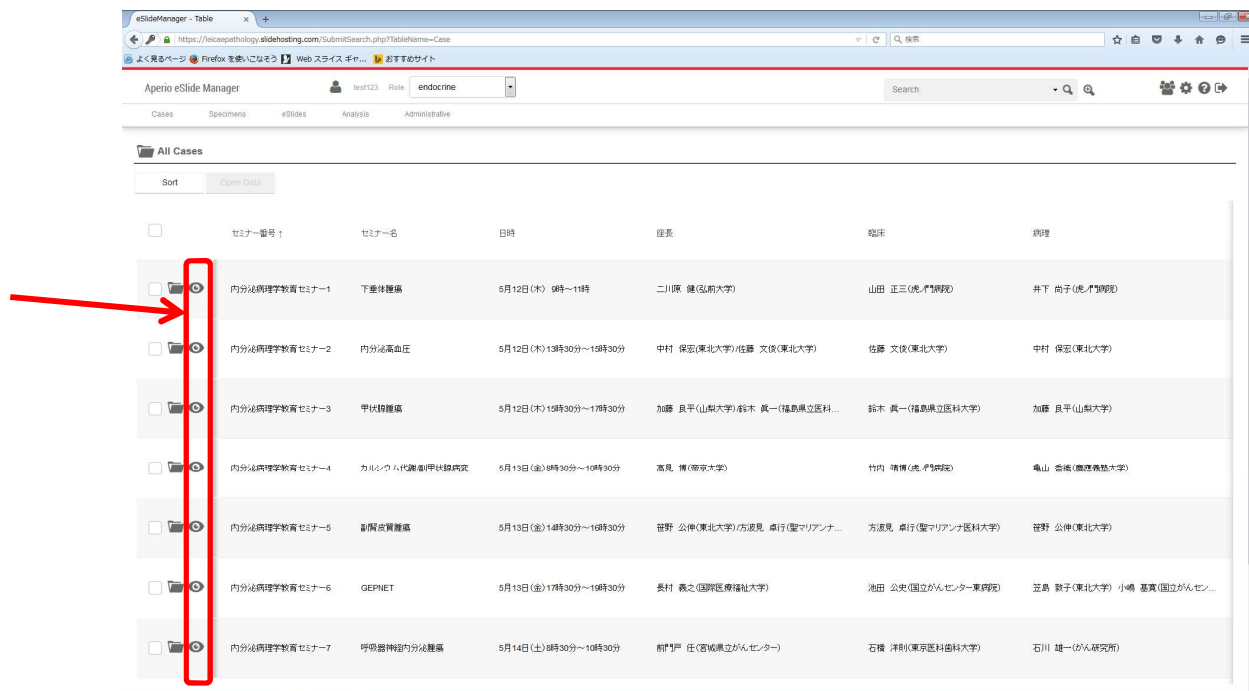

3. バーチャル画像は下記の通り表示されます。下記のズームスライダーやマウスのスクロールで画像を拡大・縮小し、ドラッグで画面を移動します。

このタブを閉じると、症例一覧の画面に戻ります



製造販売元

ライカ マイクロシステムズ株式会社

本社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-9
 大阪セールスオフィス 〒531-0072 大阪市北区豊崎5-4-9 商業第2ビル10F
 名古屋セールスオフィス 〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-20 三永伏見ビル2F
 福岡セールスオフィス 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル12F

Tel.03-6758-5690 Fax.03-5155-4337
 Tel.06-6374-9770 Fax.06-6374-9772
 Tel.052-222-3939 Fax.052-222-3784
 Tel.092-282-9771 Fax.092-282-9772

● <http://www.leicabiosystems.com/jp> E-mail: Imc@leicabiosystems.com