

N95 はディスポーザブルが原則であり、除染は PPE 不足の危機を解決するものではない。以下の情報は COVID-19 のパンデミック時を想定して検討されている。N95 除染の有効性と安全性は完全には解明されていない。

COVID-19 N95 DECON & REUSE



除染それとも 使い捨て?

✓
除染のため
に保 存



汚れなし
鼻あて破損なし
ゴム紐破損なし
破れなし
変形なし



✗
破 棄



汚れ

変形



ゴム紐破損

亀裂




鼻あて破損

鼻あて屈曲



The Content provided by N95DECON is for INFORMATIONAL PURPOSES ONLY and DOES NOT CONSTITUTE THE PROVIDING OF MEDICAL ADVICE and IS NOT INTENDED TO BE A SUBSTITUTE FOR INDEPENDENT PROFESSIONAL MEDICAL JUDGMENT, ADVICE, DIAGNOSIS, OR TREATMENT. Use or reliance on any Content provided by N95DECON is SOLELY AT YOUR OWN RISK. A link to the full N95DECON disclaimer can be found at <https://www.n95decon.org/disclaimer>.

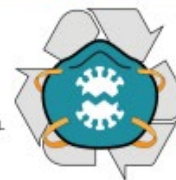

v1.1 (June 21, 2020)

www.n95decon.org