


感染症対策セットの装着方法

1 防護服装着



ファスナーは、いったん胸の部分でとめ、フードは被らないでください。

2 シューズカバー装着

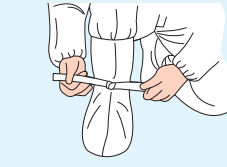

防護服の上から装着し、紐を結びます。

3 マスク装着



中面参照

V-DF-1の場合

4 防護服のフードを被る



皮膚の露出をできるだけなくすようにフードをしっかりと被ります。(ファスナーフラップに両面テープがあるものはここで貼付けます。)

5 フェイスシールド装着



シールドが顔の正面になるように、クッション及びヘッドバンドの位置を調節します。

V-D-1の場合

4 保護めがね装着



顔に合うように、ヘッドバンドの長さを調整します。

5 防護服のフードを被る



皮膚の露出をできるだけなくすようにフードをしっかりと被ります。(ファスナーフラップに両面テープがあるものはここで貼付けます。)

6 インナー手袋装着



インナー手袋の口は防護服の内側に入れます。

7 アウター手袋装着



防護服が下になるように、アウター手袋をはめます。

8 装着完了 V-DF-1



V-D-1



終了

感染症対策セットの脱衣方法

脱ぐときのポイント

- ・アウター手袋、シューズカバー等汚染度の高いものから外してください。
- ・防護服の外側、保護めがねのアイピース、フェイスシールドの外側、マスク表面等、汚染されている箇所が下着や肌につれないようにしてください。

アウター手袋、シューズカバーの底を消毒

1 アウター手袋を外す



手袋の内側を表にしながら、外します。インナー手袋が脱げないようにしてください。

V-DF-1の場合

インナー手袋を消毒

2 フェイスシールドを外す



インナー手袋を消毒

3 防護服とシューズカバーを脱ぐ




防護服のファスナーを下までおろし、皮膚や毛髪にふれないようにフードを外します。防護服は、表面を内側に丸め込むように脱ぎ、小さくまとめてください。最後に、シューズカバーと一緒に脱ぎます。

V-D-1の場合

インナー手袋を消毒

2 防護服とシューズカバーを脱ぐ

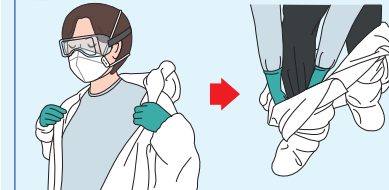

防護服のファスナーを下までおろし、皮膚や毛髪にふれないようにフードを外します。防護服は、表面を内側に丸め込むように脱ぎ、小さくまとめてください。最後に、シューズカバーと一緒に脱ぎます。

インナー手袋を消毒

3 保護めがねを外す



インナー手袋を消毒

4 インナー手袋を外す



手を消毒

5 マスクを外す



手を洗う。
顔を洗う。
うがいをする。

マスクや保護めがね等を外すときは、表面につれないように外してください。

終了

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

株式会社 重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

本 社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表)

札幌 011(743)6001	横浜 045(314)0921	倉敷 086(450)2221
仙台 022(235)7733	上越 025(545)4350	広島 082(871)5510
熊谷 048(529)7566	名古屋 052(682)4798	新居浜 0897(33)8666
東京 03(3915)8081	大阪 06(6953)8521	福岡 092(431)1265
千葉 043(301)3004	姫路 079(267)6788	長崎 095(883)1713

2022.2.3B/A/33

感染症対策

PPE Personal Protective Equipment

感染症対策セット

(マスク 防護服 手袋 保護めがね フェイスシールド シューズカバー)

■ 関連製品 ハンドソープ うがい薬 消毒剤

新型コロナウイルス
COVID-19

インフルエンザ
Influenza

炭疽菌
Anthrax

結核菌
Tuberculosis

エボラ出血熱
Ebola
hemorrhagic fever

重症急性呼吸器症候群
SARS

法令・ガイドライン等は、厚生労働省や世界保健機構(WHO)等の最新の情報をご確認ください。

感染症対策セット V-DF-1



〔各1個入〕
梱包サイズ(外寸)
W 270 × H 210 × D 80 mm

① N95マスク DD01-N95-2K



④ 手袋 アウター手袋



インナー手袋



② フェイスシールド SH-1

内側には防曇処理を施し、曇りにくい！



⑤ シューズカバー SC2000L

● JIS T 8115:2015
タイプ PB(6) 準拠品
(部分化学防護服)



アンセル 製

③ 全身化学防護服 (使い捨て式密閉服)

マイクロガード® 2000 PLUS

〈サイズ5種類〉S、M、L、XL、2XL
※注文時、サイズを指定してください。
● JIS T 8115:2015
タイプ4、5、6適合品
● EN 14126「感染性物質に対する防護」
耐人工血液浸透性 クラス6
耐バクテリオファージ浸透性 クラス6
● EN 1149-5「静電気からの防護」



アンセル 製

感染症対策セット V-D-1



〔各1個入〕
梱包サイズ(外寸)
W 280 × H 200 × D 110 mm

① N95マスク DD01-N95-2K



④ 手袋 アウター手袋



インナー手袋



② 保護めがね EE-60F-J



⑤ シューズカバー SC2000L

● JIS T 8115:2015
タイプ PB(6) 準拠品
(部分化学防護服)



アンセル 製

③ 全身化学防護服 (使い捨て式密閉服)

マイクロガード® 2000 PLUS

〈サイズ5種類〉S、M、L、XL、2XL
※注文時、サイズを指定してください。
● JIS T 8115:2015
タイプ4、5、6適合品
● EN 14126「感染性物質に対する防護」
耐人工血液浸透性 クラス6
耐バクテリオファージ浸透性 クラス6
● EN 1149-5「静電気からの防護」






アンセル 製

N95マスク

NIOSH (米国労働安全衛生研究所) が定める規格 **N95** 合格品



ラムダラインは、
ハ(ラムダ)形になった
保形テープが立体
構造をしっかりとキープ
するマスクの愛称。

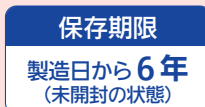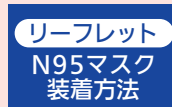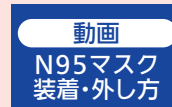

DD02-N95-2K ● 合格番号 TC-84A-7646



DD02V-N95-2K ● 合格番号 TC-84A-7645



排気弁付 熱気やムレによる不快感や
息苦しさを軽減します。

DD01-N95-2K ● 合格番号 TC-84A-7642



DD01V-N95-2K ● 合格番号 TC-84A-7644



排気弁付 熱気やムレによる不快感や
息苦しさを軽減します。

個装タイプ

個装で衛生的



品番: **DD02-N95-2K DD02V-N95-2K**
数量: 1箱10個入
小箱寸法: 約 108 × 183 × 95 mm

コンパクト



品番: **DD01-N95-2K DD01V-N95-2K**
数量: 1箱10個入
小箱寸法: 約 130 × 130 × 72 mm

配布・備蓄用に



品番: **DD02-N95-2K DD02V-N95-2K**
数量: 1箱100個入
大箱寸法: 約 406 × 249 × 191 mm

二つ折タイプ

毎日の作業用に



品番: **DD02-N95-2K DD02V-N95-2K**
数量: 1袋10個入
袋寸法: 約 330 × 55 × 220 mm

※ **排気弁付** は、ご自身の予防のためにお使いください。(咳エチケットにはなりません。)

防護手袋

アンセル 製

37-176

安心の厚手タイプ

● 柔軟性があり、作業しやすい手袋です。
● 強度に優れた生地です。



材質 ニトリル

93-260

着脱しやすい特殊コーティング

● 3層構造で薄手の手袋です。



材質 ニトリル、ネオプレン

保護めがね

EE-60F-J

ベンチレーター(換気口)なし

● JIS T 8147:2016、
EN 166:2002 クラス1 適合品
● 視力矯正めがねと併用可。



フェイスシールド

SH-1

曇りにくくクリアな視界

● 内側には防曇処理を施しており、
曇りにくいフェイスシールドです。



手洗い 手指の殺菌・消毒・洗浄に

● 手洗いのタイミング……食事前、帰宅時、トイレの後
● 手洗いのポイント……指先、爪、指の間など汚れが残りやすい部位

薬用泡ハンドソープ ハンドホイップ [アルボース 製]

クリーミーな泡で手指の洗浄 と同時に殺菌・消毒

● 殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合
● さっぱりとした洗い上がり
● 手洗い約700回分
● 手に残りにくいフローラルの香り
(微香性)
● つぶせる容器で、廃棄時に
かさばりません。
● 仕様 500 mL



指定医薬部外品

手指消毒剤 ハンドアルサワー NL [アルボース 製]

● 水洗い不要の速乾性手指消毒剤
● 食品及び食品添加物に登録されている
原料だけを使用しています。
● ノンエンペローブウイルス
にも効果があります。
● 仕様 100 mL、1 L、4 L



うがい 口腔内の殺菌・消毒・洗浄に

● うがいのタイミング……帰宅時、食事後、
のどに違和感があるとき

口腔殺菌消毒剤 うがい薬CPN [アルボース 製]

● 殺菌剤CPC(塩化セチルピリジニウム)
配合により、優れた殺菌・消毒効果を発揮し、
口腔内を清潔に保ちます。
● メントールの爽やかな香りです。
● 仕様 800 mL (ポンプ付)




指定医薬部外品

立体構造をしっかりとキープ!

NIOSH規格
N95
合格品

ラムダライン
LINE

ラムダラインは、Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりとキープするマスクの愛称。

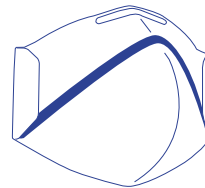

動画
「装着・外し方」



リーフレット
「装着方法」




写真はDD02-N95-2K

3つの機能で もれなく安全

1 アジャスター
しめひもの長さ調節ができます。

2 クッション
内側のクッションによって、マスクと鼻部の
すき間をなくすることができます。

ぴったり
密着!

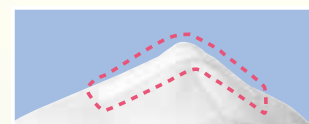

3 鼻当て
外側の鼻当てによって、
鼻の形に合わせることができます。

●金属部品を使用していません。

日本製

マスク内側

個装タイプ

個装で衛生的 ……



品番: DD02-N95-2K DD02V-N95-2K
数量: 1箱10個入
小箱寸法: 約 108 × 183 × 95 mm

コンパクト ……

名刺サイズタイプ



品番: DD01-N95-2K DD01V-N95-2K
数量: 1箱10個入
小箱寸法: 約 130 × 130 × 72 mm

配布・備蓄用に ……



品番: DD02-N95-2K DD02V-N95-2K
数量: 1箱100個入
大箱寸法: 約 406 × 249 × 191 mm

二つ折タイプ

毎日の作業に ……



保管に便利なチャック付

品番: DD02-N95-2K DD02V-N95-2K
数量: 1袋10個入
袋寸法: 約 330 × 55 × 220 mm

NIOSH(米国労働安全衛生研究所)が定める規格 **N95** 合格品

DD02-N95-2K

丸み のあるデザイン



合格番号 TC-84A-7646

DD02V-N95-2K

丸み のあるデザイン

排気弁付

熱気やムレによる
不快感や息苦しさを
軽減します。



合格番号 TC-84A-7645

DD01-N95-2K



合格番号 TC-84A-7642

DD01V-N95-2K

排気弁付

熱気やムレによる
不快感や息苦しさを
軽減します。



合格番号 TC-84A-7644

排気弁付 はご自身の予防のためにお使いください。
(咳エチケットにはなりません。)

保存期限

未開封の状態、製造日から **6年**

密着性の確認 (シールチェック ユーザーシールチェック)

密着性の良否を確認する機器
(マスク内圧・フィッティング
テスター等)を用いる(定量法)か、
次の方法(定性法)でご確認ください。

マスク全体を両手で覆い、
陽圧法 息を吐きます。
陰圧法 すばやく息を吸います。

※排気弁付きは、陰圧法でシールチェックをしてください。

マスクと顔の間から空気の漏れがなければ、密着性は良好です。



商品コード

品番	タイプ	入り数[個]	商品コード
DD02-N95-2K	個装	10	30371
		100	30376
	二つ折	10	30370
DD02V-N95-2K	個装	10	30378
		100	30377
	二つ折	10	30375
DD01-N95-2K	個装	10	30330
DD01V-N95-2K	(名刺サイズ)	10	30340



日本の国家検定を受検していませんので、
日本国内での労働衛生対策用としては使用しないでください。

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

株式会社 重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

本 社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表)

札幌 011(743)6001 横浜 045(314)0921 倉敷 086(450)2221
仙台 022(235)7733 上越 025(545)4350 広島 082(871)5510
熊谷 048(529)7566 名古屋 052(682)4798 新居浜 0897(33)8666
東京 03(3915)8081 大阪 06(6953)8521 福岡 092(431)1265
千葉 043(301)3004 姫路 079(267)6788 長崎 095(883)1713