

NEWPORT COMPASS

患者換気モニター コンパスVM200

呼吸管理をより安全に、より確実に！
バックアップ換気機能がついて、
さらにグレードアップ!!

コンパスVM200はニューポート・ベンチレーター
 モデルE200 “ウェーブ” 専用開発された呼吸
 換気量、吸入酸素濃度モニターです。
 E200本体横に取り付けるだけで簡単に使用
 できます。



◎コンパスを使用するにはニューポートE200の専用カート (Cat. No. CRT200A) が必要になります。



◆ 換気量測定

最新のホットフィルム方式を採用しています。
 測定精度は1~2,000mlの範囲で、わずか±5%
 です。

◆ パラメーター

呼吸1回換気量、呼吸分時換気量、I:E比、
 吸入酸素濃度、呼吸流速の5種類の計測が切り
 換えにて表示可能です。

- ・BIAS FLOW (連続流) の影響を受けない正確な換気量測定。
- ・簡単かつスムーズな校正。
- ・分時換気量、吸入酸素濃度に関する2種類の警報機能による高い安全性。
- ・流量ランプの監視によりauto-PEEP、呼吸回路のリークも検出できます。

02B輪第0671号



本社 東京都港区東麻布2-3-4 〒106
 ☎03(3586)1421 FAX03(3586)1420

東京 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル2F 〒140
 ☎03(5762)3011 FAX03(5762)3021
 技術センター ☎03(5762)3006 FAX03(5762)3036
 札幌 ☎011(717)0350 FAX011(758)3901
 仙台 ☎022(275)5952 FAX022(273)3392
 名古屋 ☎052(775)7800 FAX052(775)7830
 大阪 ☎06(308)8311 FAX06(308)8353
 九州 ☎092(271)4695 FAX092(271)4669

NMI
NEWPORT MEDICAL INSTRUMENTS, INC.

The Navigator Graphics Monitor

ニューポート呼吸グラフィックス・モニター

モデルGM250


“ナビゲーター”

ウィーニングまでの頼もしいパートナー
1台で新生児から成人までの呼吸管理に対応出来ます。

特徴

ナビゲーターGM250では…

- 簡単なプリントアウトによるトレンド分析。
- 新生児から成人まで1ユニットで対応。
- あらゆる人工呼吸器で使用可能。
- フルオートキャリブレーションによりユーザーの手間が大幅に削減。
- 独自の流量認識により患者、ベンチレータの両方の換気データを同時に表示。
- 新生児用オクルージョンバルブ使用により、小児での換気力学機能の評価。
(気道抵抗、呼吸器系コンプライアンス、時定数、一回換気量)が可能。
- 換気中のリーク率を表示。
- 分かりやすい警報機能。
(呼吸回数、分時換気量、最高気道内圧)

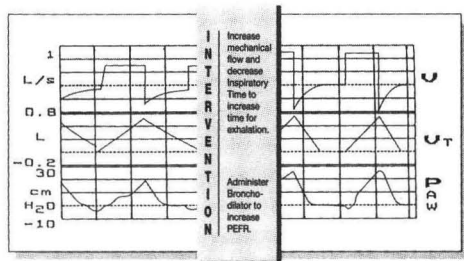

ナビゲーターはベンチレータの設定変更、気管支拡張剤等必要な薬剤投与のタイミングを適切に示します。この図においては、結果的にauto PEEPのレベルを低下させています。

対応処置

強制換気流量を増加させ、吸気時間を短縮させて呼気の時間を長くして下さい。気管支拡張剤の投与による呼気流速の増加が望まれます。

輸入元/株式会社 承認番号06B輸第0350号・承認番号06B輸第0376号

総販売元

 **TOKIBO**
CO., LTD.
株式会社 東機貿

本社 東京都港区東麻布2-3-4 〒106
☎ 03(3586) 1421 FAX 03(3586) 1420

東京 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル2F 〒140
☎ 03(5762) 3011 FAX 03(5762) 3021
技術センター ☎ 03(5762) 3006 FAX 03(5762) 3036
札幌 ☎ 011(717) 0350 FAX 011(758) 3901
仙台 ☎ 022(275) 5952 FAX 022(273) 3392
名古屋 ☎ 052(775) 7800 FAX 052(775) 7830
大阪 ☎ 06(308) 8311 FAX 06(308) 8353
福岡 ☎ 092(271) 4695 FAX 092(271) 4669