

_____年度 定期点検予定表

参考資料①

型式	管理番号	シリアル番号	予定回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

医療機器安全管理責任者; 印

定期(機能)点検表

型式 _____

管理番号又はシリアルNo.: _____

点検項目	点検年月日					
1. 本体外観						
2. 電源コード/プラグ						
3. 酸素/空気配管						
4. 各種フィルター						
5. 電源スイッチ						
6. 各表示ランプ						
7. 日付/時間表示						
8. 換気モード						
9. 一回換気量						
10. 換気回数						
11. トリガ感度						
12. PEEP/CPAP						
13. プレッシャーサポート						
14. 無呼吸アラーム						
15. バックアップ換気の作動						
16. 換気モニタ						
17. 気道内圧モニタ						
18. 低圧アラーム						
19. 高圧アラーム						
20. 低分時換気量アラーム						
21. 高分時換気量アラーム						
22. 停電アラーム						
23. バックアップバッテリー						
24. 供給ガス圧低下アラーム						
25. 可聴アラーム・消音						
26. 吸入酸素濃度						
27. 手動換気						
28. 呼気弁ユニット						
29. 加温加湿器						
30. 回路サポートアラーム						
31. 付属品						
32. その他						
使用時間						
点検実施者						

コメント・備考

使用前点検表

型式 _____

管理番号又はシリアルNo. _____

点検項目	点検年月日					
1. 電源コード/プラグ						
2. 酸素/空気配管						
3. 各種フィルタ-の汚損						
4. 各表示ランプの動作						
5. 換気モード毎の動作状況						
6. 無呼吸アラ-ムの動作						
7. バックアップ換気の動作						
8. 気道内圧モニタの動作						
9. 低圧アラ-ムの動作						
10. 高圧アラ-ムの動作						
11. 供給ガス圧低下アラ-ムの動作						
12. 吸入酸素濃度						
13. 手動換気の動作						
14. 加温加湿器・給水						
15. 回路サホ-トアラ-ム						
16. 用手換気用具の有無						
使用時間						
点検実施者						

コメント・備考

患者使用時点検表

参考資料④

<開始時>

使用指示者

日付/サイン	
--------	--

人工呼吸器装着者

日付/サイン	
--------	--

呼吸器の点検

1. 換気モード	
2. 最高気道内圧	
3. 吸気時間	
4. 換気回数	
5. 一回換気量もしくは設定圧	
6. PEEP設定	
7. プレッシャーサポート設定	
8. トリガ感度設定	
9. 吸入酸素濃度設定	
10. 低圧アラーム設定	
11. 高圧アラーム設定	
12. 低分時換気量アラーム設定	
13. 高分時換気量アラーム設定	
14. 酸素濃度アラーム	
15. AC表示	
16. 加温加湿器設定	
点検実施者	

<施行中>

型式

管理番号又はシリアルNo.:

点検項目	点検年月日						
1. 電源コード/プラグ							
2. 酸素/空気配管							
3. 呼吸回路内の貯留水							
4. 加湿器チャンバーの水量レベル							
5. 低圧アラームレベル							
6. 高圧アラームレベル							
7. 低分時換気量アラームレベル							
8. 高分時換気量アラームレベル							
9. 換気モード							
10. 最高気道内圧レベル							
11. PEEPレベル							
12. 一回換気量もしくは設定圧							
13. 換気回数							
14. トリガ感度レベル							
15. 設定吸入酸素濃度							
16. フィルタの汚損							
17. 装置本体からの異音等							
18. 用手換気用具の有無							
使用時間							
点検実施者							

<回路交換実施時>

患者状態チェック

1. 胸の上がり	
2. 聴診	
3. 呼吸数	
4. 脈拍数	
5. 血圧	
6. SpO ₂	
7. ETCO ₂	
8. 自発呼吸数	
9. 呼気自発呼吸量	
点検実施者	

人工呼吸器の点検

1. 最高気道内圧レベル	
2. 各種設定	
3. 加湿器チャンバーの水量レベル	
4. 各アラームレベル	
5. 吸入酸素濃度	
6. 呼気弁ユニット	
7. フィルタの汚損	
8. 回路の吸気・呼気確認	
9. 装置本体からの異音等	
点検実施者	

回路交換実施者

日付/サイン	-----
--------	-------

使用後点検表

型式 _____

管理番号又はシリアルNo.: _____

点検項目	点検年月日					
1. 装置本体						
2. 電源コード/プラグ						
3. 酸素/空気配管						
4. 各種フィルタ-の汚損						
5. 呼気弁ユニット						
6. 加温加湿器						
7. 回路サポートアーム						
8. 用手換気用具						
点検実施者						

コメント・備考