



国立個人保護技術研究所 (NPPTL)

Counterfeit Respirators / Misrepresentation of NIOSH-Approval

Promoting productive workplaces
through safety and health research 

2020年6月1日更新

偽造マスクは、NIOSHの承認を得て誤って販売および販売されている製品であり、労働者に適切な呼吸保護を提供することができない場合があります。

NIOSHが偽造のマスクや市場でのNIOSHの承認を誤って伝えていることに気づいたら、ユーザー、購入者、製造業者に警告するためにここに投稿します。

NIOSH認定のマスクを識別する方法：

NIOSH認定のマスクには、マスクのパッケージ内またはパッケージ内（つまり、ボックス自体および/またはユーザーの指示内）に承認ラベルがあります。また、FFR自体にも簡略化された承認があります。[NIOSH認定機器リスト \(CEL\)](#) または [NIOSH Trusted-Source](#) ページで承認番号を確認して、人工呼吸器がNIOSHによって承認されているかどうかを確認できます。NIOSH承認のFFRには、常に次のいずれかの指定がありま

す：N95、N99、N100、R95、R99、R100、P95、P99、P100。


人工呼吸器が偽造されている可能性があるという兆候：

- フィルタリングフェイスピースマスクにはマーキングがありません
- フェイスピースマスクまたはヘッドバンドのフィルタリングに承認 (TC) 番号がありません
- NIOSHマーキングなし
- NIOSHのスペルが間違っている
- 装飾的なファブリックまたはその他の装飾的なアドオン（例：スパンコール）の存在
- 子供のための承認の要求（NIOSHは子供のためのいかなる種類の呼吸器保護も承認しませ





HuiZhou LexusLance Technologies Co., Ltd. (<https://www.lexuslance.com/sy>) はNIOSHテストレポートを改ざんしており、製品を偽って伝えるために使用していません。LexusLanceは、NIOSHが自社の製品をテストしたかのように見せるために、NIOSHテストレポートの偽造コピーをWebサイトに投稿しました。NIOSHは、LexusLanceで製造された製品をテストしていません。さらに、NIOSHは、KN95ユニットやその他の国際規格に認定された呼吸保護装置のテストおよび承認は行いません。(2020年6月1日)

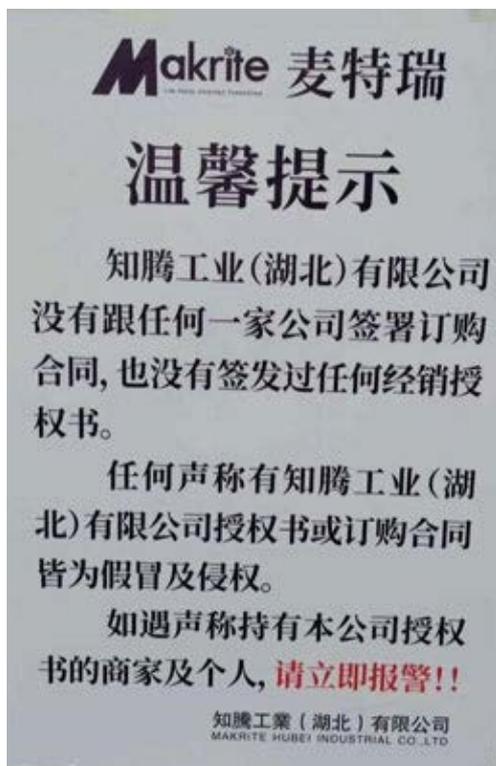

手紙の翻訳：「マクライト湖北産業株式会社は、いかなる企業との購入契約または契約にも署名しておらず、配布承認も発行していません。Makrite Hubei Industrial Co., Ltdと承認または購入契約を結んでいると主張する者は、偽造および侵害です。マクライト湖北産業株式会社からの承認書または認証を持っていると主張する企業または個人の場合は、すぐに警察に報告してください。」


NIOSHの承認保持者であるMakrite Industries Inc.の子会社であるMakrite Hubei Industrial Co., Ltdは、Makriteの許可なしに製造されている可能性があり、NIOSH承認として誤って表示される可能性がある製品について顧客に警告する通知を発行しました。(2020年5月15日)




これは、NIOSH承認製品の不実表示の例です。Jiangyin Chang-hung Industrial製またはGRANDEのラベルが付いた製品は、NIOSH承認されていません。パッケージに記載されているTC-84A-4503、-84A-4639、-84A-4643、および-84A-4646の番号は、NIOSHの有効な承認番号ではありません。(2020年5月14日)



これらは、NIOSHがwww.covidness.netで承認したとして誤って伝えられているマスクの2つの例です。□。SEKURA-321は、承認番号TC-84A-6660でNIOSH承認済みとしてリストされています。これはMakriteに発行された有効なNIOSH承認番号ですが、ウェブサイトは偽造のマスクを販売しており、許可なしにMakriteの承認番号を使用しています。2番目の例はMIUTONと呼ばれます。NIOSH認定として誤って表示されていますが、NIOSHは承認していません。(2020年5月13日)

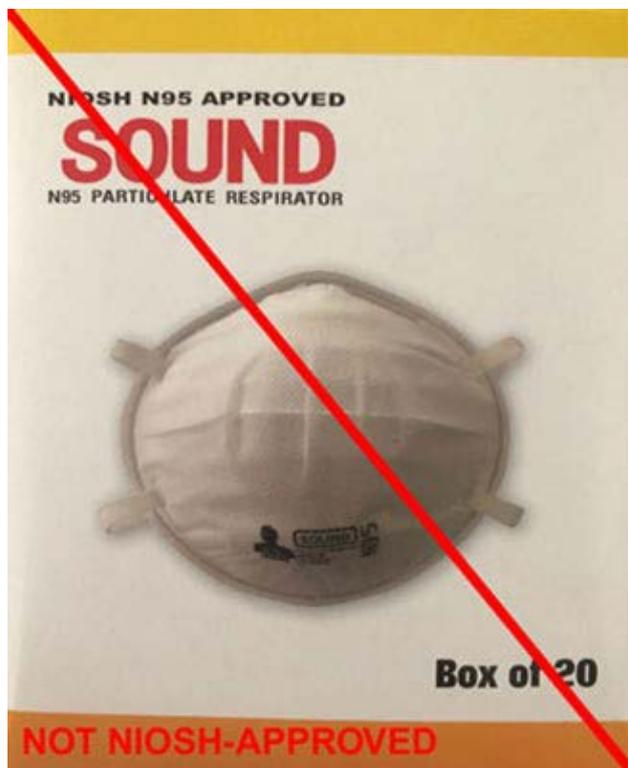

これは、Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co. Ltd (SDH) のNIOSH承認番号TC 84A-4335を無断で使用した偽造マスクの例です。SOUNDはNIOSHの承認保持者またはプライベートルーベル保持者ではありません。(2020年4月28日)

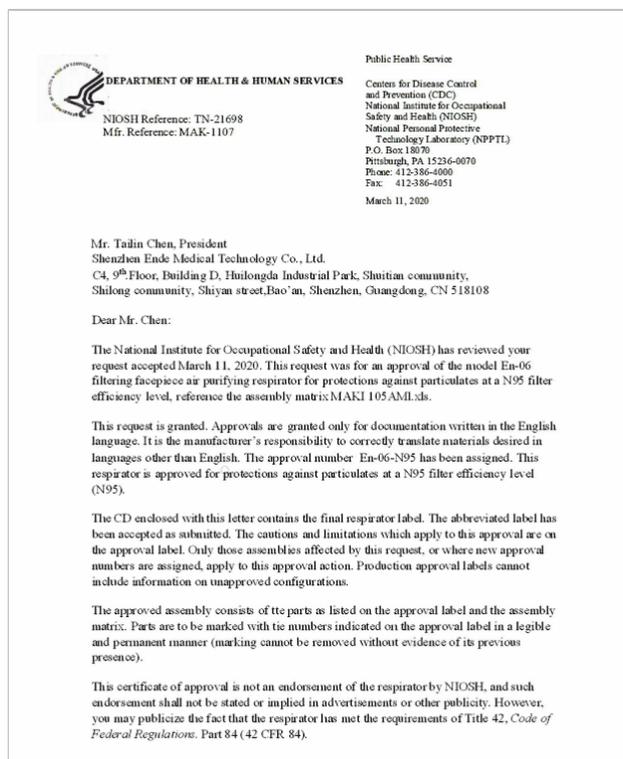

Page 2 — — FN-17685

No changes may be made to any respirators and accompanying documentation without prior written approval of NIOSH. Requests for changes must be submitted to NIOSH and a modification of this approval must be granted before changes are made.

Sincerely yours,



Herrn W. Ahlers
Chief Technology Evaluation Branch
National Personal Protective Technology Laboratory

Enclosures

**TEST REPORT**

Task Number: TN-21698

Manufacturer: Shenzhen Ende Medical Technology Co., Ltd.

Prepared by: Jeremy Branmen

Tests Conducted by: Jeremy Branmen

Date: March 30, 2011

Respirator Tested: EN-06

Background Information

In an application accepted March 11, 2020 Shenzhen Ende Medical Technology requested an approval of the model EN-06-N95 filtering facepiece air purifying respirator for protections against particulates at a N95 filter efficiency level, reference the assembly matrix MAK1105AML.xls.

Tests Assigned

Test Description	STP Number	Reference
A. Exhalation Resistance Test	RCT-APR-STP-0003	84.180
B. Inhalation Resistance Test	TEB-APR-STP-0007	84.180
C. Sodium Chloride (NaCl) N95 Test	TEB-APR-STP-0059	84.181

Overall Results

The items tested passed laboratory testing.

Individual Test Results

See attached test data sheets.

TEB-1020 Rev. 0
Page 1 of 1

NIOSHはこの手紙とテストレポートを深センエンデメディカルテクノロジー株式会社に発行しませんでした。NIOSHからのように見えますが、これらのドキュメントは変更され、含まれている情報は改ざんされています。Shenzhen Ende Medical Technology Co., Ltd.はNIOSHの承認保持者ではありません。深センエンデのN95フィルター式フェイスピースマスクは、NIOSH承認済みまたはこれらの文書が添付されていると主張している場

合、NIOSH承認されていませ
ん。(2020年4月27日)





これらは、許可なく上海大生健康製品製造有限公司 (SDH) のNIOSH承認番号を使用している偽造マスクの例です。これらのモデルには、モデルDTC3X (TC-84A-4329とマークされている)、DTC3W (TC-84A-4335とマークされている)、DTC3B (TC-84A-4336とマークされている)、DTC3Z (TCとマークされている) が含まれますが、これらに限定されません。-84A-8150)、およびRaxwell RX9501P。イヤーループ付きのSDH マスクはNIOSH承認されていないことに注意してください。(2020年4月17日)




これは、NIOSH承認の不実表示の例です。G&F Productsは、NIOSH承認保持者またはプライベートラベル保持者ではありません。（2020年4月9日）



Maskinとして販売されているマスクは、NIOSHの承認を受けていません。それらは偽造されているか、NIOSH承認に準拠していません。（2020年4月9日）



NOT NIOSH-APPROVED

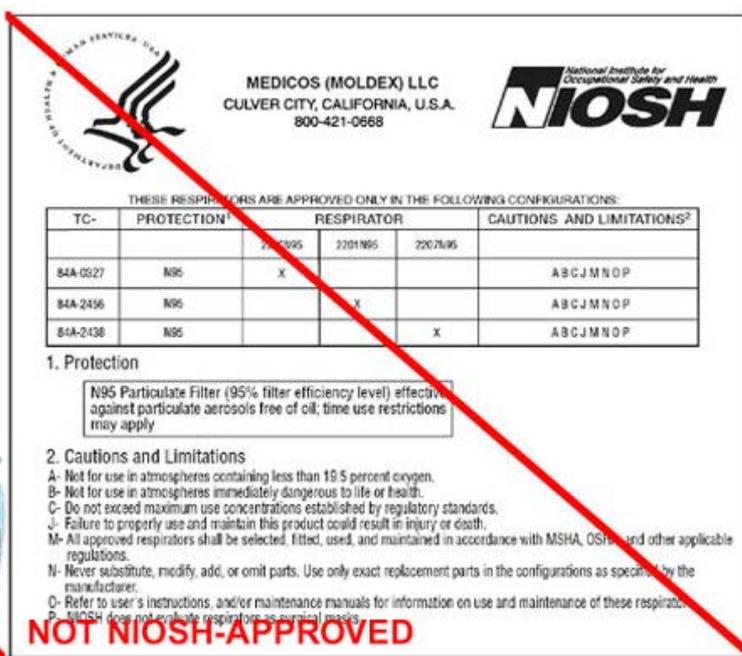

NOT NIOSH-APPROVED

これは偽造マスクの例です。メディコス、Moldexの許可なしに、Moldex承認番号とラベルを使用してN95マスクを販売しています。Medicosは、NIOSH承認保持者またはプライベートラベル保持者ではありません。(2020年3月12日)




NOT NIOSH-APPROVED



NOT NIOSH-APPROVED

これはNIOSH承認の不実表示の例です。YarkはNIOSHの承認保持者またはプライベートラベル保持者ではありません。さらに、同梱のマスクには、CE (ヨーロッパ) 承認マークとNIOSH N95が含まれています。これは、NIOSH認定のマスクには使用できない形式です。(2020年3月5日)

モデル番号K320のGuangzhou Weini Technology & Development Co., Ltd. (GWT)

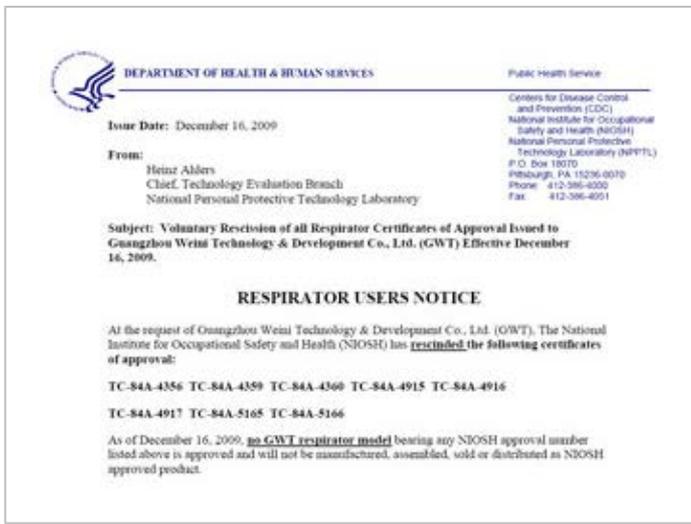

マスクは、NIOSH承認を受けていません。GWTマスクの承認は2009年に取り消されました。詳細については、[ユーザー通知](#)を参照してください。ユーザー通知に記載されているNIOSH承認番号が記載されたGWTマスクは、NIOSH承認されていません。（2020年2月10日）



人工呼吸器の顔にマーキングはありません。（2019年11月6日）



NIOSHは、子供に対するいかなる種類の呼吸器保護も承認していません。（2019年11月6日）



NOT NIOSH-APPROVED

人工呼吸器の顔にマーキングはありません。(2019年11月6日)



NOT NIOSH-APPROVED

この製品はNIOSH承認されていません。正面のマーキングを見てください。ロゴが間違っています。承認番号がありません (TC-84A-xxxx)。(2019年11月6日)



NOT NIOSH-APPROVED

この製品はNOSH承認さ

れていません。製品の表面にNIOSHロゴまたは承認番号はありません。(2019年11月6日)



この製品はNIOSH承認されていません。製品の表面にNIOSHロゴまたは承認番号はありません。(2019年11月6日)









ここの画像は偽造マスクの例です。これらのマスクは、製造元のAnhui Tongcheng YaGe Health Materials、Co.、LtdがNIOSH承認保有者またはプライベートラベル保有者としてリストされていなくても、NIOSH承認済みであるかのように販売されています。(2019年10月23日)



これらは、NIOSH承認の不実表示の例です。PitBull Safety ProductsはNIOSH承認保持者ではありません。(2019年10月7日)




これはNIOSH承認の不実表示の例です。Vogmask[®]は、NIOSH承認保持者ではありません。この表現は誤解を招くものであり、正確ではありません。最良の粒子フィルタリングの結果のためのプレミアム技術とデザインで、私たちのNIOSH認

定Vogmask[®]はから...なスモッグや煙など、ほこり、細かい粒子状物質 (PM)、花粉、大気汚染から¹を保護し、再利用可能な、優れた日常のフェイスマスクです [HTTPS://www.vogmask.ca/](https://www.vogmask.ca/) □



これは、2つの偽造マスクの例です。Valpro Safetyは、3Mの承認番号 (TC-84A-007) とラベルを使用して、レンジャー821およびレンジャー821Vマスクを3Mの許可なく販売しています。(19年6月19日)

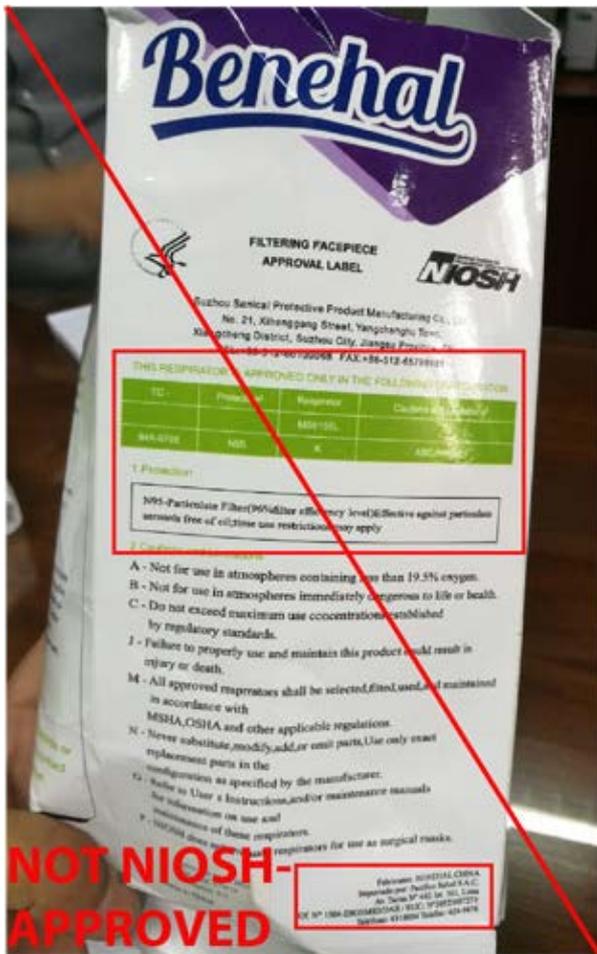

これは偽造マスクの例です。Pacifico Salud SACは、SSPの許可なく、蘇州衛生保護（SSP）承認番号（TC-84A-6766）とラベルを使用してユニットを販売しています。さらに、レスピレーターパッケージには2つのエラーがあります。最初のエラーは、N95マスクが96%効率的であると主張していることです。2番目のエラーは、パッケージの右下隅にあり、呼吸器はNIOSH承認保持者ではないBenehal Chinaによって製造されていることを示しています。（2019年1月4日）



この偽造マスク、NT-V2 Nano双方向マスクは、NIOSH承認番号を使用して、NIOSH承認済みとして宣伝されています。TC番号 (TC 84A-0427) は、カートリッジ付きの3Mフルフェイスピースマスクに属し、3Mの許可なく使用されました。さらに、この偽造マスクは、Pasture Pharmaによって製造されたものではありません。



このマスクは、製造元のFitSealがNIOSH承認保持者またはプライベートラベル保持者としてリストされていないにもかかわらず、NIOSH承認済みであるかのように販売されています。(2019年2月19日)



これはNIOSH承認の不実表示の例です。Wein Products (WPI) のすべての承認は2011年に取り消されました。ただし、製造元のWebサイトでは引き続き、ViraMask N99ESCがNIOSHによって認定されていると述べています。[撤回を発表するユーザー通知を表示します。](#)



これは、NIOSHが注目した偽造N95マスクの例です。TC番号とプライベートラベルホルダーは有効ですが、この未承認のユニットは、マスクの前面にあるNIOSHのスペルミスによって識別できます。






これらは偽造マスクの例です。これらのマスクは、製造元のZubi-OlaがNIOSH承認保持者またはプライベートラベル保持者としてリストされていないにもかかわらず、NIOSH承認済みであるかのように販売されています。

マスクの承認マーク（下の図）または[認定機器リスト](#)をチェックして、マスクがNIOSH承認済みであることを確認してください。追加情報は、NIOSH [Trusted Sourceページ](#)で入手できます。

NIOSH承認のフィルタリングフェイスピースマスクの正しい外部マーキングの例

Example of Exterior Markings on a NIOSH-approved Filtering Facepiece Respirator

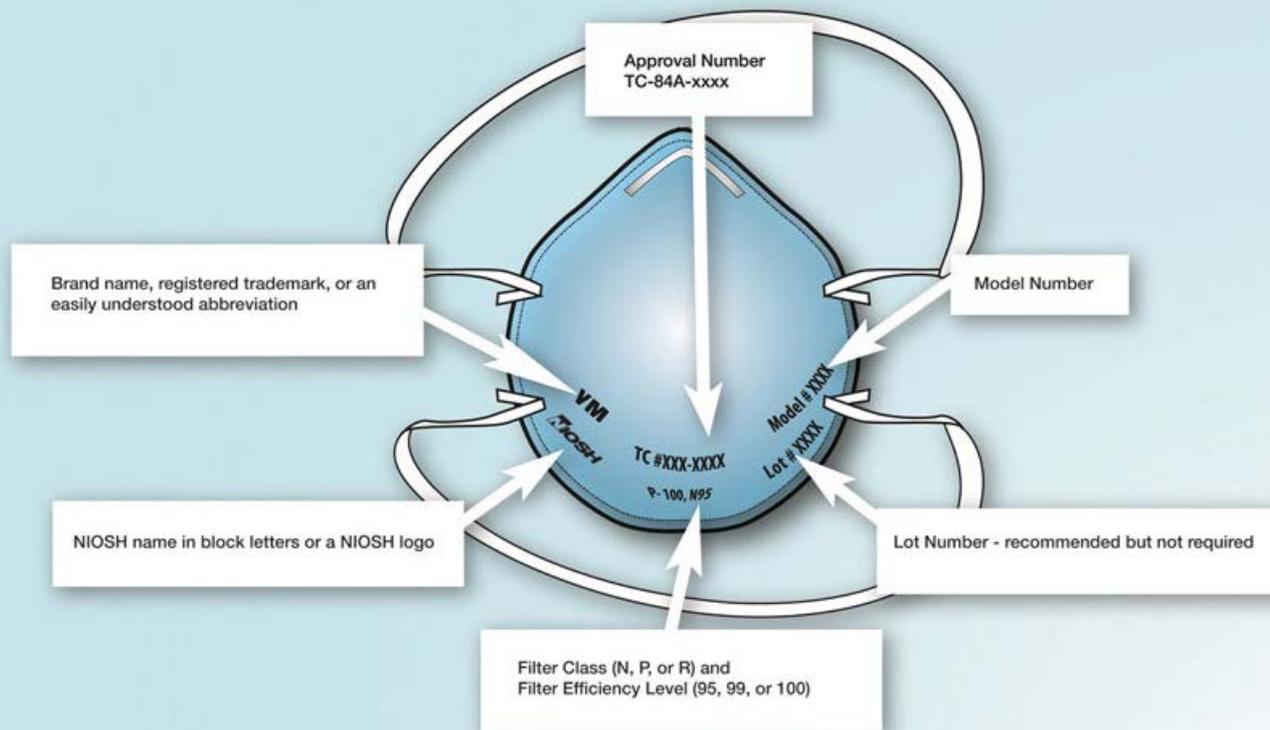

最後にレビューされたページ： 2020年6月1日

NPPTL

NPPTLウェブサイトの最新情報

A to Zインデックス

人工呼吸器ユーザー向け

人工呼吸器メーカー向け

COVID-19応答をサポートするための人工呼吸器の評価

防護服とアンサンブル

NIOSHの保護技術プログラム

2019年NIOSH呼吸保護週間

呼吸保護のインフォグラフィック

ヘルスケア呼吸保護リソース

消防士の個人用保護具のサポート

防護服の選択に関する考慮事項

標準開発委員会へのNPPTLの参加

人工呼吸器の信頼できるソース情報

承認された粒子フィルタリングフェイスピースマスク

認定機器リスト (CEL)

PPE CASEレポート

人工呼吸器ユーザー通知

collapse

偽造マスク/NIOSH承認の不実表示

会議、ウェビナー、および会議

適合性評価の通知と人工呼吸器メーカーと関係者への手紙

NPPTLについて

NPPTLに連絡する

NPPTLと接続する

[Listservを購読する](#)

[PPEの懸念?お問い合わせ](#)

NIOSHをフォローする

[フェイスブック](#)

[Pinterest](#)

[ツイッター](#)

[YouTube](#)

NIOSHホームページ

[NIOSH AZ](#)

[職場の安全と健康に関するトピック](#)

[出版物と製品](#)

[プログラム](#)

[NIOSHに連絡する](#)

質問がありますか？

CDC-INFOにアクセス

800-232-4636に電話する

電子メールCDC-INFO

24時間年中無休

CDC情報

[CDCについて](#)

[仕事](#)

[資金](#)

[ポリシー](#)

[ファイルビューアとプレーヤー](#)

[プライバシー](#)

[FOIA](#)


[恐怖法なし](#)

[OIG](#)

[無差別](#)

[アクセシビリティ](#)

[CDCと接続する](#)

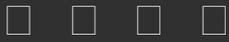

米国保健福祉省

USA.gov

CDCウェブサイトの終了に

関する免責事項